



## DonJoy Crutches

### Optimal bruk

Hjelp til gange etter skade eller operasjon **Gå:** Len deg på krykken og beveg deg forover. Hold krykken tett inntil kroppen mens du går for å unngå ulykker. **Høydejustering:** Ta klipset av rørene ved hjelp av begge tomlene, juster så det indre røret til ønsket høyde og lås igjen med klipset.

Før du bruker krykken må du sjekke at metallpinnen på klipset har gått gjennom begge rør og stikker ut fra ytre rør. Krykkene har to justeringshull på det ytre røret og fem hull på det indre røret, som til sammen gir ti justeringsposisjoner. Krykken kan justeres i trinn på to cm.

### Fordeler og egenskaper

*Vekt og mål (krykker til voksne)*

- Maksvekt som krykkene tåler: 150 kg
- Lengde på krykken (håndtak til gulv): 74 – 96 cm
- Vinkel på håndtak: 28°

### Sammensetning

Anodiserte aluminiumsrør og håndtak av polypropylen

### Bestillingsinformasjon

| DONJOY CRUTCHES  |                    |        |
|------------------|--------------------|--------|
| Artikkelnummer   | Beskrivelse        | Antall |
| 24-2000-U-36060  | Krykker til voksne | 6 par  |
| 11-2510-P-360710 | Krykker barn       | 1 par  |